

Cadeira De Rodas Motorizada

Manual de Operação



NEAT 4



Índice :

I.	Introdução_____	03
II.	Precauções de segurança_____	03
III.	Manual de Operação_____	04 - 10
IV.	Funções_____	11
V.	Especificações do modelo_____	12

I. Introdução:

Este manual serve para uso de scooter elétrico da Ortomix modelo NEAT 4

Sinais abaixo aparecerão no manual, favor confirme o significado representativo de cada um e faça uma leitura cuidadosa do manual.

 **Alerta : O uso inadequado do produto poderá causar ferimentos ou morte do usuário**

 **Atenção : O uso inadequado poderá danificar o produto**

 **Sugestões : Siga as instruções para que as operações tornassem mais fáceis.**

 **Alerta : Para evitar o perigo, leia com atenção os itens de precauções de segurança**

II. Precauções de Segurança:

1. Verifique se houver falta ou danificação de peça ao abrir a embalagem.
2. Este produto é restrito ao uso de uma única pessoa.
3. Sempre desligue a máquina, deixando a chave em posição OFF antes de subir ou descer de seu veículo
4. Veículo em movimento pode sofrer interferência eletromagnética (EMI) emitida a partir de fontes tais como estações de rádio, rádios bidirecionais e telefones celulares que podem danificar o sistema de controle.
5. Não ziguezague ou fazer curvas de forma abrupta para evitar o tombamento da scooter.
6. Antes de passar o cruzamento tome cuidados para que as rodas não serem presas no trilho .
7. Verifique se o seu corpo todo está bem encaixado no scooter para evitar o perigo.
8. Não exceda a capacidade máxima de peso.
9. Não suba rampa ou ladeira excessivamente inclinada , por favor obedeça à instrução da limitação descrita na especificação.
10. Sempre obedeça às leis de trânsito locais, quando dirigir o seu scooter na estrada, evite dirigir na hora do rush e deve conduzir ao longo da estrada para evitar o perigo.
11. Não conduza a scooter em mau tempo, como dia de chuva.
12. Não conduza a scooter na escada rolante.
13. Não conduza a scooter no escuro da noite.
14. Recomenda-se no caso da não utilização do produto a recarga das baterias mensalmente.

 **GARANTIA DA CADEIRA DE RODAS DE 1 (UM) ANO**

 **GARANTIA DAS BATERIAS 3 (TRÊS) MESES**


Nota: Ortomix não é responsável por danos decorrentes de falha no cumprimento das instruções relacionadas ao uso do produto.

ATENÇÃO ESTE PRODUTO NÃO É APROVA D'AGUA COMO TODO PRODUTO ELÉTRICO NÃO PODE MOLHAR


III. Manual de Operação:

1.Panel: Consulte figuras abaixo


Modelo : NEAT 4

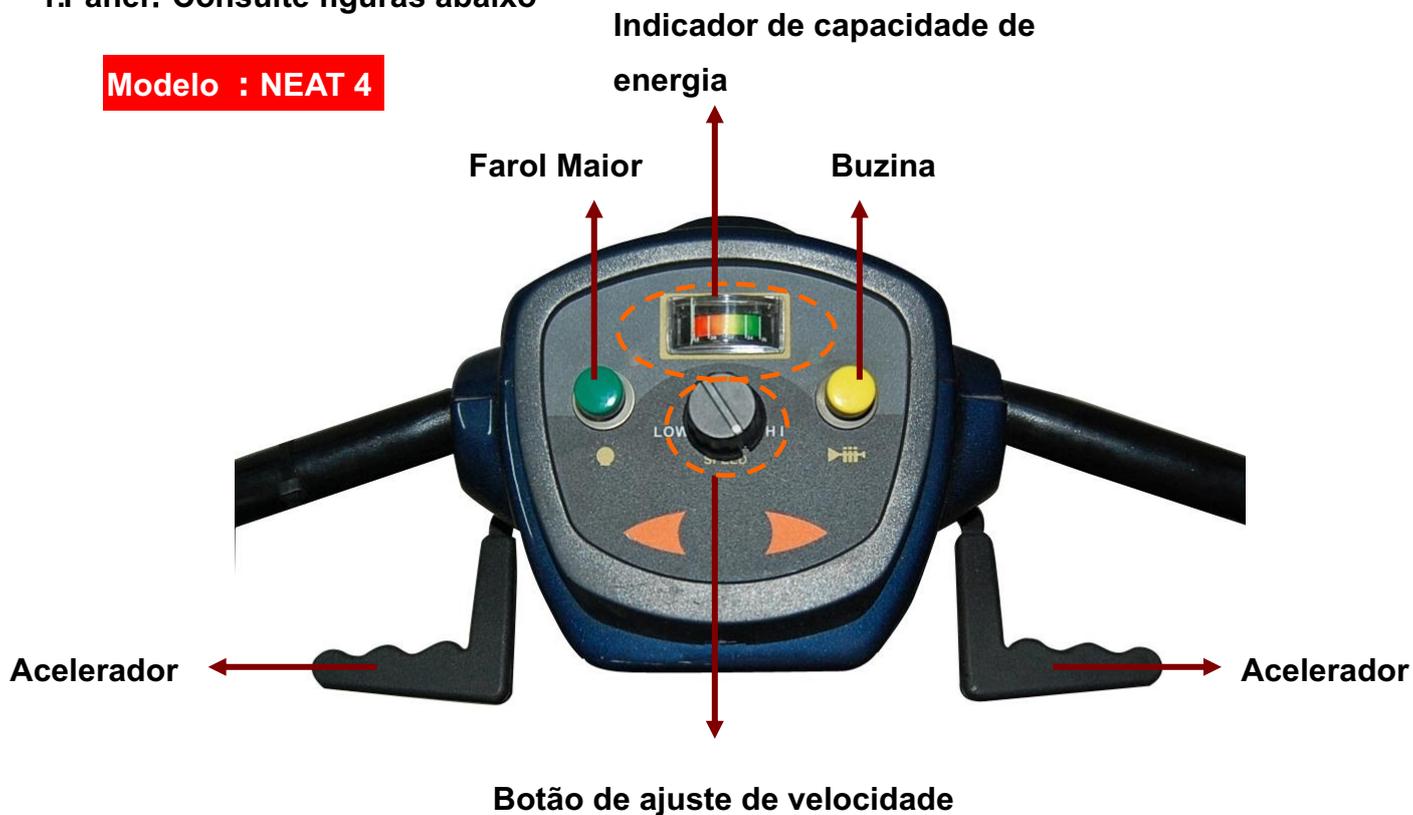

Ajuste de velocidade :

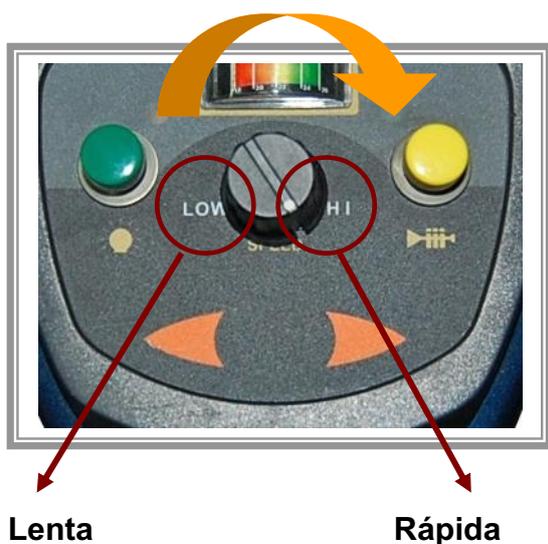

Indicador de energia :

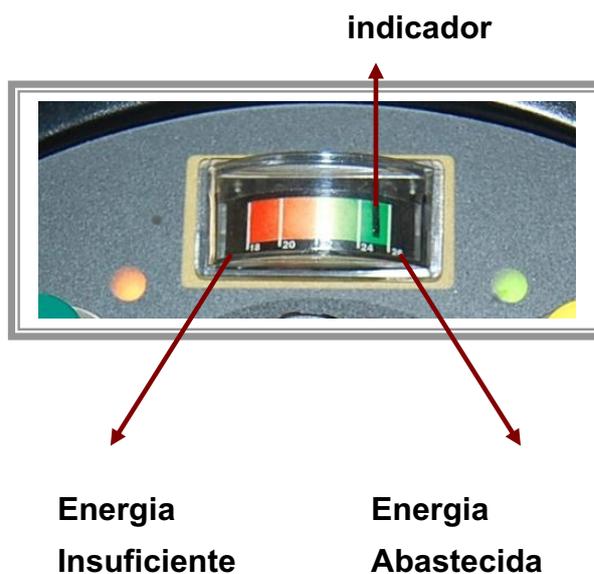

Para ajustar a velocidade, basta girar o botão

Figuras ilustrativas de uso

Uso de Acelerador :




Acelerador retrógrado

Acelerador de Avanço

A figura mostra o lado **direito** do scooter. Pressione a alavanca de aceleração para baixo para aumentar velocidade e mover a scooter para a frente





A figura mostra o lado **esquerdo** do scooter. , pressionando a alavanca de aceleração para baixo, poderá mover a scooter para trás.

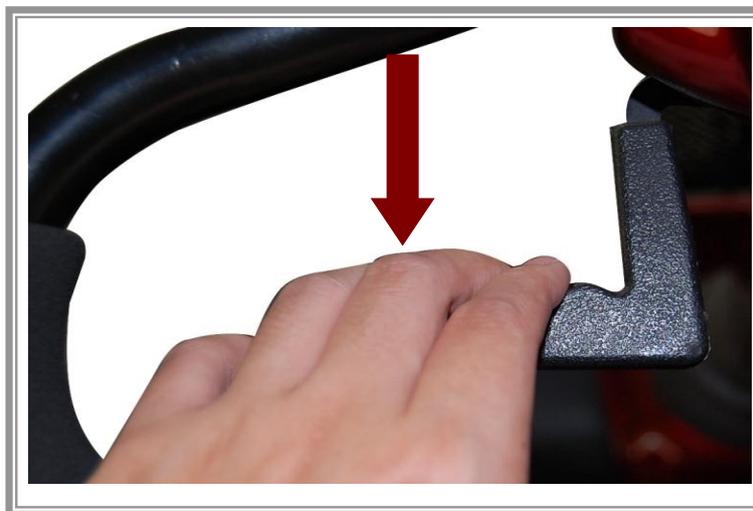


Fugira ilustrativa de uso

Uso da chave para ativação/desligamento :

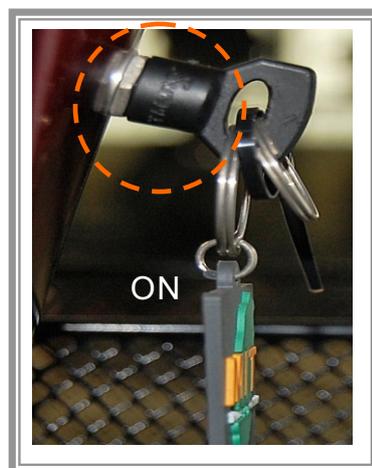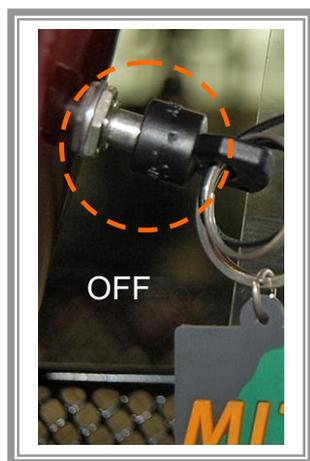


Pressione a chave até o fim, estará ativando a scooter

Ajuste de ângulo da alça T :

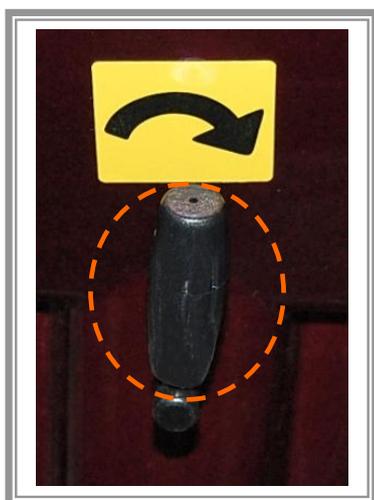

Gire em sentido horário a alça do tanque de pressão hidráulica

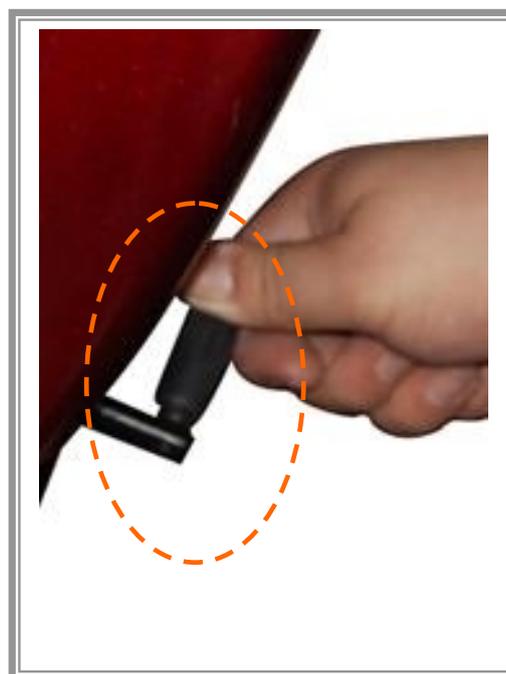

Gire em sentido horário a alça do tanque de pressão hidráulica, ao mesmo tempo pressionando a alça para baixo poderá ajustar o ângulo.

Fugira ilustrativa de uso

Ajuste de Assento :



Ajuste giratório de assento levantando a alça para cima, poderá ajustar o assento a posição confortável.


Ajuste da largura de assento :



Solte o parafuso em forma de estrela, poderá ajustar a largura entre os braços.


Figura ilustrativa de uso

Ajuste dos braços :

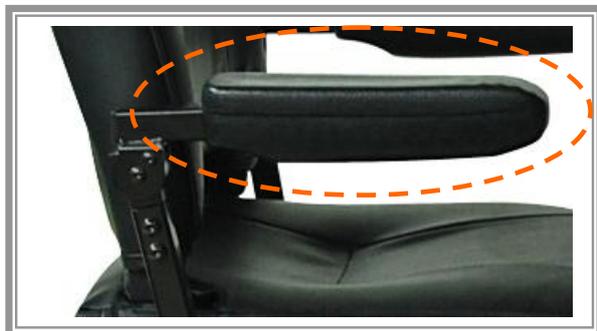


Braços ajustáveis facilita o uso do assento.

Ajuste da altura do assento :

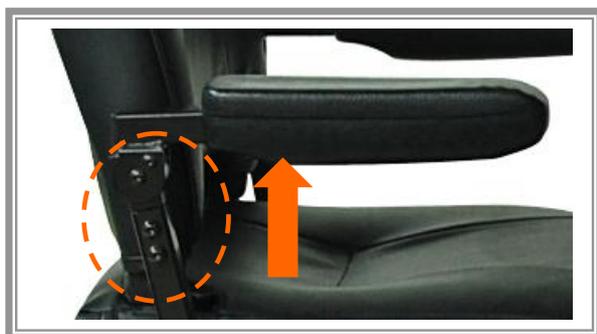

Solte os parafusos dos braços, poderá ajustar a altura dos braços.

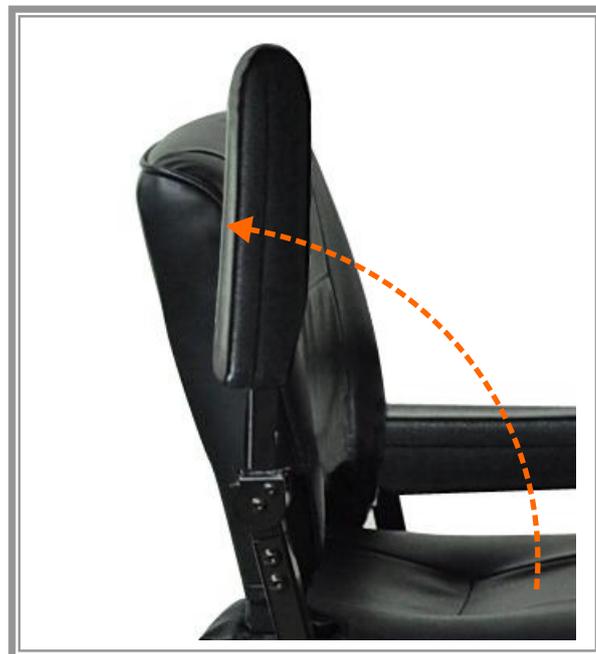

Braço Levantado.

Uso de freio eletro -magnético:



Figura ilustrativa de uso

Marcha D : Sob condições normais ou durante o percurso, o freio permanece na marcha D

Marcha N : Quando a energia estiver esgotada, para mover a scooter manualmente, puxar a alavanca de marcha D para marcha N.

funções:



Design do farol frontal



Design do sinal de alerta traseiro




Design Anti- Tip das rodas

Figuras ilustrativas de uso

1. Verifique se a forma de carregamento de bateria está correta (Tensão/Se estiver carregado por completo).
2. Favor não desmonte ou transformar o carregador de bateria.
3. Favor carregue a bateria num ambiente com boa ventilação e evite a incidência direta de raio solar, evite ao mesmo tempo a umidade (no tempo de nevoeiro, dias chuvosos ou úmidos).
4. Não carregue bateria quando a scooter estiver coberta por material a prova de água.
5. Não carregue a bateria enquanto a temperatura ambiente estiver abaixo de 0°C ou acima de 40°C , afim de evitar danos que afeta o funcionamento da máquina.
6. Afaste-se dos materiais inflamáveis para evitar incêndio ou explosão.
7. A bateria poderia gerar gás de nitrogênio, carregue a bateria num ambiente com boa ventilação.
8. Evite contato com a tomada ou cabo de carregamento quando as mãos estiverem molhadas para evitar o perigo de choque elétrico.
9. Carregue a bateria até que a luz do sinal verde estiver acesa, evite interrupção que possa diminuir a vida útil da bateria.
10. Não use carregador superior a 5A.



Tomada de carregamento localizado na cobertura traseira.

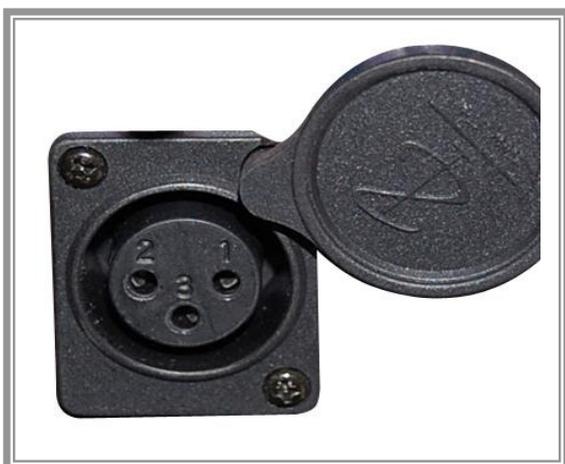

Insira plug nesta tomada para carregamento.

V. Especificações do Modelo Neat 4



Cor da Cobertura	Vinho/Azul/Prata
Comprimento	1220mm
Largura	590mm
Distância a percorrer por cada carregamento de energia	40KM (36AH)
Velocidade	10KPH
Distância a percorrer após o freamento total	2M
Raio de giro	1000mm
Tamanho da roda dianteira	260*85mm (Roda cinza inflável com listamento reto)
Tamanho da roda traseira	260*85mm (Roda cinza inflável com listamento aleatório)
Distância ao solo	100mm
Carga Máxima	137KG
Maior grau de inclinação permitida	Solo plano (137KG)
	9° (137KG)
	12° (105KG)

INSPEÇÃO DO PRODUTO

- Tapeçaria Identificação Rodas Funcionamento
 Braços Embalagem Pintura Acessórios
 Pedais Componentes

Data: ____ / ____ / ____ Visto: _____

CERTIFICADO DE GARANTIA

GARANTIA

- Materiais empregados que apresentem possíveis defeito de fabricação;
- Comprometimento de funcionamento mecânico.

EXCLUSÃO

- Desgaste natural devido a tempo de utilização;
- Transformações, alterações do padrão original de fabrica ou utilização de acessórios ou peças incompatíveis;

- Assistência prestada por local não autorizado;
- Inobservância das instruções contidas nesse manual.

GENERALIDADES

- O fabricante não se responsabiliza por danos causados ao objeto decorrente de acidentes;
- Este certificado so terá validade com indentificação do posto de venda assim como da data de compra.



ORTOMIX®

Fone: 55(62) 3283-5600

Rua Aymores, Q;57 L; 1/13-24/32

Jd Eldorado- Cep.: 74993-020

Aparecida de Goiânia - Goiás-BRASIL

comercial@ortomix.com.br

www.ortomix.com.br